




## Schritt 1: Insufflationsdruck

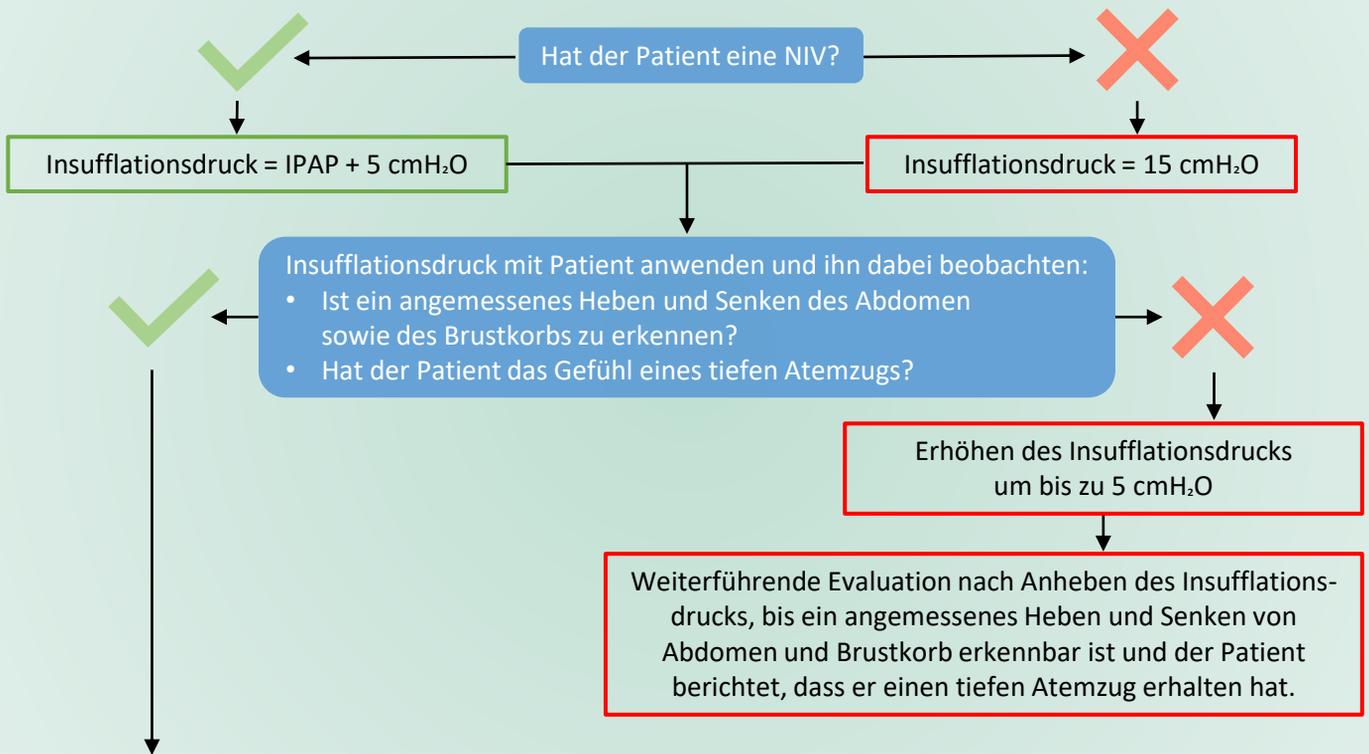

## Schritt 2: Exsufflationsdruck

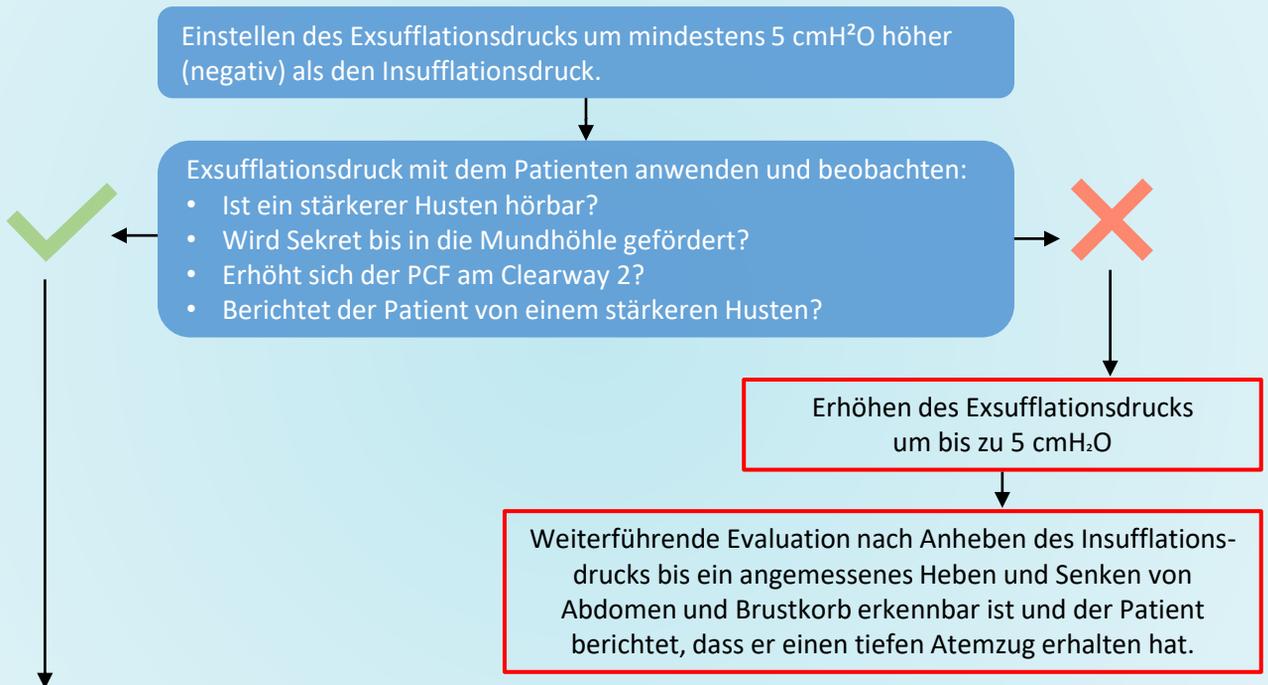

## Schritt 3: Zeiten im Automatikmodus

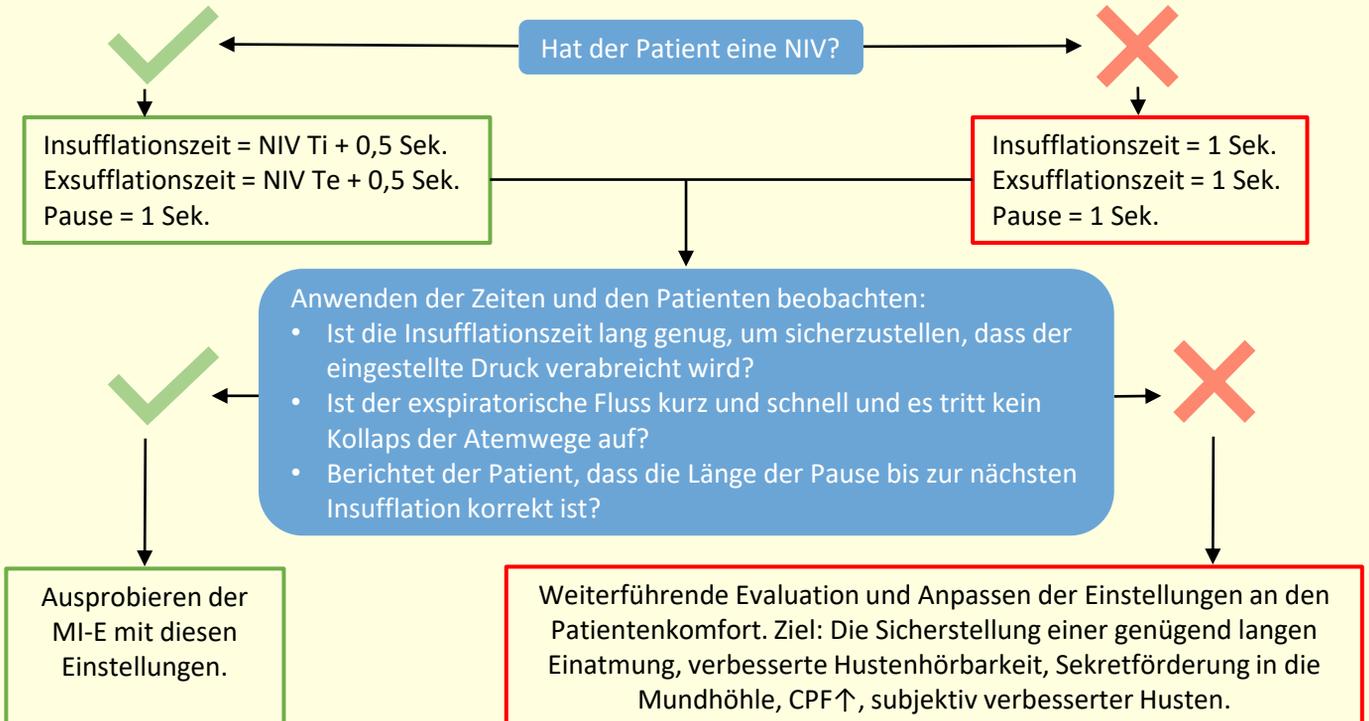

# Clearway 2



## FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE

- Einzigartiges Feature: TreatRepeat®-Funktion
- Touchscreen-Bedienfeld
- Fernbedienung mit Start-/Stopp-Funktion (optional)
- Interner Akku (optional)



## VIELSEITIGE MODI-OPTIONEN

- Programmierbare, automatische Modi
- Benutzerdefinierbarer IPPB-Modus
- Manueller Modus



## PATIENTENCOMPLIANCE UND SYNCHRONITÄT

- TreatRepeat® -Funktion zur genaueren und schnelleren Titration
- iTrigger® – innovative Trigger-Technologie
- SynchronyBeep® zur Unterstützung der Synchronität zwischen Anwender und Gerät



Clearway 2 - Artikelnummer 2210 D  
Hilfsmittelnummer 14.24.08.3012

## Verfügbare Schlauchsysteme



Schlauchsystem mit  
Bakterienfilter  
Artikel-Nr.: 2210.101



NIV/IPPB-Leckage-  
Schlauchsystem  
Artikel-Nr.: 2210.102

## Erste Schritte: IPPB

Durchfluss auf 60 l/min (Mittelwert)

Starten des Drucks bei 10–15 cmH<sub>2</sub>O

Einstellen des Plateaus auf 1 Sekunde. Wenn ein längerer Atemhub benötigt wird, diesen Zeitraum verlängern.

Einstellen des Triggers auf 5 (Wenn ein Kind behandelt wird, ist eine empfindlichere Einstellung voraussichtlich indiziert).